

NORMONJET PLUS

INDICACIONES / DESCRIPCION

- 1) 100 Agujas estériles de un solo uso por caja.
- 2) Agujas siliconadas.
- 3) Cono de plástico: rosca métrica
- 4) Las agujas pueden ser utilizadas con todas las jeringas y sistemas de jeringas usadas para la anestesia dental.
- 5) Las dimensiones de la aguja figuran en el precinto de seguridad.

APLICACIÓN / INSTRUCCIONES DE USO

Posicionado de la aguja en la jeringa:

- 1) El precinto garantiza la esterilidad de cada aguja. Por lo tanto sólo deben usarse agujas con el precinto de seguridad intacto.
- 2) Romper el precinto de seguridad haciendo girar las 2 partes del plástico protector en sentido contrario.
- 3) Enrosque la aguja a través del cono en la jeringa.
- 4) Retire el plástico protector justo antes de administrar la inyección. Puede utilizarlo nuevamente para retirar la aguja de la jeringa evitando el riesgo de un pinchazo fortuito.

PRECAUCIONES

- 1) Sólo para uso dental.
- 2) No utilizar si el precinto de seguridad está roto.
- 3) No doblar la aguja, pues puede causar la rotura de la aguja.
- 4) No superar la fecha límite de utilización que figura en el acondicionamiento exterior.
- 5) Prohibida su reesterilización.

PRESENTACIONES

Cajas de 100 unidades en las siguientes medidas:

- Normonjet Plus 30G 0,3x12 mm.
- Normonjet Plus 30G 0,3x25 mm.
- Normonjet Plus 27G 0,4x25 mm.
- Normonjet Plus 27G 0,4x35 mm.
-

CE 0086

Fabricado por:
SOFIC. BP 282
81207 Mazamet – France

Distribuido por:
NORMON S.A.
Ronda de Valdecarrizo, 6
28760 Madrid - España