

### Presentación:

Código de producto	Presentación / Cantidad	N.º de unidades / caja individual
NOS	Solución en spray de 100ml para la eliminación de cerumen	1

### Composición:

Aqua purificada, agua de mar, cristales de mentol, 1%.

### Beneficios clínicos:

**NORMOMAR OTICLEAN** permite limpiar de una manera suave, eficaz y segura la delicada parte interna de los oídos.

**NORMOMAR OTICLEAN** utilizado 2-3 veces por semana, ayuda a prevenir la formación de tapones de cera manteniendo los oídos limpios.

### Características de actuación:

**NORMOMAR OTICLEAN** está indicado para toda la familia, incluidos los niños a partir de dos años. Su efecto es rápido y es fácil de usar, dentro o fuera de la ducha o bañera, preferiblemente sentado. Inicialmente, debe utilizarse al menos durante 10 días de modo regular, para adaptarse a la refrescante experiencia de **NORMOMAR OTICLEAN**, que proporciona a sus oídos una nueva sensación de limpieza.

### Indicación:

Producto recomendado para prevenir la acumulación de cerumen y la eliminación de este.

### Contraindicaciones:

**NORMOMAR OTICLEAN** no debe utilizarse en personas alérgicas a sus componentes.

### Modo de empleo:

Para obtener los mejores resultados, utilice una vez al día durante 10 días, y luego 2-3 veces por semana.

1. En el primer uso, presione fuertemente el pulsador para romper el sello de seguridad.
  2. Coloque el dedo índice en el pulsador del pulverizador.
  3. Inserte suavemente la boquilla en el oído, manteniendo la cabeza erguida, y presione durante 1 segundo.
  4. Deje la solución en el oído durante 10 segundos.
  5. Incline suavemente la cabeza para permitir el vaciado del oído una vez lavado.
  6. Seque con cuidado el oído externo con una toalla limpia o pañuelo.
  7. En caso de producción de cerumen excesivo, deje actuar el producto durante 10 minutos. Repita el procedimiento hasta 4 veces si es necesario.
- Repita el proceso en el otro oído. Enjuague la boquilla con agua caliente después de cada uso.

### Precauciones de uso:

- Asegúrese de utilizar **NORMOMAR OTICLEAN** a temperatura ambiente: 20°C - 25°C.
- En caso de dolor o molestia persistente del oído, abandone el uso del producto y consulte a su médico. Esto puede indicar la presencia de un tapón de cera duro y/o obstructivo o de inflamación.
- No introduzca ningún objeto (por ejemplo, bastoncillos de algodón) en los oídos antes o después de usar **NORMOMAR OTICLEAN**.
- No seque el conducto auditivo demasiado vigorosamente después de su uso ya que esto podría provocar irritación o inflamación.
- No utilice después de la fecha de caducidad indicada en la caja y la etiqueta.

### Precauciones adicionales:

- No lo utilice si usted tiene dolor de oído, infección de oído, otitis externa (también conocida como oído del nadador), perforación del tímpano, timpanostomía o drenaje timpánico, trastornos del equilibrio, si ha sido

sometido a cirugía de oído o si tiene algún cuerpo extraño en el oído o una obstrucción de cerumen duro y/o obstructiva cuyos síntomas pueden ser: problemas de audición, dolor, pitidos, sensación de taponamiento, sordera temporal después de nadar o ducha). No lo use en niños menores de dos años.

• **NORMOMAR OTICLEAN** es únicamente para uso en el oído. No pulverizar cerca de los ojos o la boca.

### Almacenamiento:

- Proteger de la humedad y la exposición solar.
- Temperatura máxima: 35°C.

### Efectos secundarios no deseados:

**NORMOMAR OTICLEAN** proporciona una nueva sensación de frescor y limpieza en sus oídos.

NOTA: Puede experimentar una sensación de oído taponado, que rápidamente desaparece una vez que se inclina la cabeza para permitir la salida del líquido.

### A advertencias:

- Este producto es exclusivamente para uso externo. La ingestión de la solución puede causar problemas de estómago.
- En caso de personas con discapacidad mental, el producto debe usarse únicamente bajo la supervisión de una persona mentalmente sana y sin discapacidad.
- No utilizar el producto si el envase está dañado.
- No utilizar el producto después de la fecha de caducidad.
- El producto debe mantenerse alejado de niños y mascotas. La introducción en el oído de pelos o suciedad procedente de mascotas puede causar una infección de oídos.
- Mantener alejado de fuentes de calor, chispas llamas o superficies calientes.
- Envase a presión. No agujerear, ni quemar, ni siquiera tras agotarse.
- No exponer a temperaturas superiores a 50°C.

### Envasado:

Spray con 100 ml de solución. Hasta 300 pulverizaciones.

NOTA: Cualquier incidente serio, ocurrido en relación con un producto de TAISSIS CONCEPT S.R.L. debe ser notificado a TAISSIS CONCEPT S.R.L. y a las autoridades competentes del estado miembro en el que el paciente o consumidor se encuentre.



Última revisión: enero 2020

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Producto no estéril		Mantener protegido de la luz solar
	No utilizar si el envase está dañado		Almacenar a temperaturas máximas de 35°C
	Mantener seco		Símbolo de advertencia en relación a desechar el envase en la basura de reciclaje
	Cumple con la Directiva Europea 93/42/EEC		

Status regulatorio: Producto Sanitario clase IIa de acuerdo a MDD 93/42/EEC

## Agua Marina

Higiene nasal diaria

Fuerza 0

Presentación:

Producto sanitario

Código de producto	Presentación / Cantidad	N.º de unidades / caja individual
NAM	Spray con 100 ml de solución salina isotónica	1

### Composición:

Agua marina: 30 ml/100 ml aproximadamente. Agua purificada c.s.: 100 ml.

### Beneficios clínicos:

- Normomar es un producto natural, sin conservantes, que puede utilizarse durante períodos prolongados.
- Normomar es 100 % natural: se trata de una solución salina isotónica\* que proporciona los beneficios conocidos de las sales minerales de agua marina, así como oligoelementos: cobre, hierro, manganeso, selenio, zinc, etc.
- \*Solución isotónica: solución que contiene la misma concentración de sal que el cuerpo humano.

### Características de funcionamiento:

- Gracias a su tecnología de microgota y a los beneficios de los oligoelementos marinos, Normomar permite una limpieza suave y descongestiona la nariz.
- Induce la necesidad de sonarse la nariz y lo facilita.
- Restablece la hidratación natural de la nariz (combate los efectos del aire acondicionado y la calefacción).
- Prepara y permite la acción de tratamientos nasales específicos y mejora su eficacia.

### Indicaciones:

- Normomar es un producto sanitario indicado para **bebés recién nacidos, niños y adultos**:
- Higiene nasal diaria.
- **Elimina la mucosidad nasal en narices congestionadas y taponadas.**

### Contraindicaciones:

- No usar en caso de que la nariz se encuentre totalmente taponada.
- No ingerir.

### Modo de empleo:

Normomar puede utilizarse en todas las posiciones.

Su exclusivo pulverizador está específicamente diseñado para adaptarse a la nariz tanto de recién nacidos como de adultos:

1. Utilizar este producto como irrigador nasal siempre que sea necesario.
2. Introducir el pulverizador en un orificio nasal con suavidad.
3. Presionar un instante la boquilla. En caso de tener la nariz congestionada o taponada, presionar el pulverizador durante unos segundos.
4. Permitir la salida del exceso de solución, ya que también arrastrará la mucosidad.
5. Repetir el proceso en el otro orificio nasal.
6. Limpiar el pulverizador tras cada aplicación con agua y jabón, aclarar y secar.

### Precauciones de uso:

- **No aplicar cuando los niños estén recostados para evitar que el líquido se desuée a la garganta.**
- **No bloquear ni ocluir por completo el conducto nasal durante la aplicación para evitar presión en la nariz y oídos.**
- **Si los síntomas persisten o empeoran, o en caso de que no se produzca mejoría tras haber intentado despejar la nariz; si la secreción continúa siendo espesa y amarilla o verde, o si se presentan otros síntomas de enfermedad como fiebre o infección de oídos, consultar a un profesional sanitario.**

### Precauciones adicionales:

Este producto no debe usarse tras una cirugía nasal, a menos que se lo indique un médico.

De uso exclusivo por un único paciente; el empleo de este producto por varios pacientes puede provocar infecciones.

- El spray con solución salina isotónica está destinado, exclusivamente, a su uso en la nariz. No pulverizar cerca de los ojos ni la boca.

### Conservación:

- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Temperatura: exponer a 35° C máximo.

### Efectos adversos:

- Sensación de hormigueo transitoria cuando la mucosa nasal se encuentra muy irritada.

### A advertencias:

- El producto está destinado, exclusivamente, al uso externo; la ingesta de la solución puede producir problemas estomacales.
- En pacientes con discapacidad mental, estos productos solo deben emplearse bajo la supervisión de una persona mentalmente sana.
- No utilizar el producto si el envase está dañado.
- Estos productos no deben usarse después de la fecha de caducidad.
- Estos productos deben mantenerse fuera del alcance de los niños y mascotas. La entrada en la nariz de pelos o suciedad de mascotas puede causar infección de nariz/oído. Asimismo, la ingesta de pelos y suciedad de mascotas produce enfermedades graves.
- Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llamas o superficies calientes.
- Envase a presión. No perforar ni quemar, ni siquiera después de usado.
- No exponer a temperaturas superiores a 50° C.

### Acondicionamiento:

Spray con 100 ml de agua marina. Hasta 300 pulverizaciones, aproximadamente.

**NOTA:** Cualquier incidencia surgida en relación con productos de **TAISSIS CONCEPT S.R.L.** debe notificarse a **TAISSIS CONCEPT S.R.L.**, así como a la autoridad competente del Estado miembro de residencia del usuario y/o paciente.



Última revisión: enero 2020

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	No utilizar si el envase está dañado		Símbolo de advertencia para desechar el envase en la basura
	Mantener protegido de la luz solar		Mantener a una temperatura máxima de 35°C
	Mantener seco		De conformidad con la Directiva 93/42/CEE
	Producto no estéril		

**Situación regulatoria: Producto sanitario de Clase IIa según Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE**

Distribuido por:  
LABORATORIOS NORMON, S.A.  
Ronda de Valdecarrizo, 6  
28760 Tres Cantos - Madrid (ESPAÑA)  
www.normon.es

**Taissis Concept SRL**  
Ion Ticaloiu Street no. 17  
115400 Campulung, Arges, Romania  
Tel: +40 248 512 830. Fax: +40 248 512 870  
office@taissis.ro  
Ed.388.00